




Szczegóły Klamry C

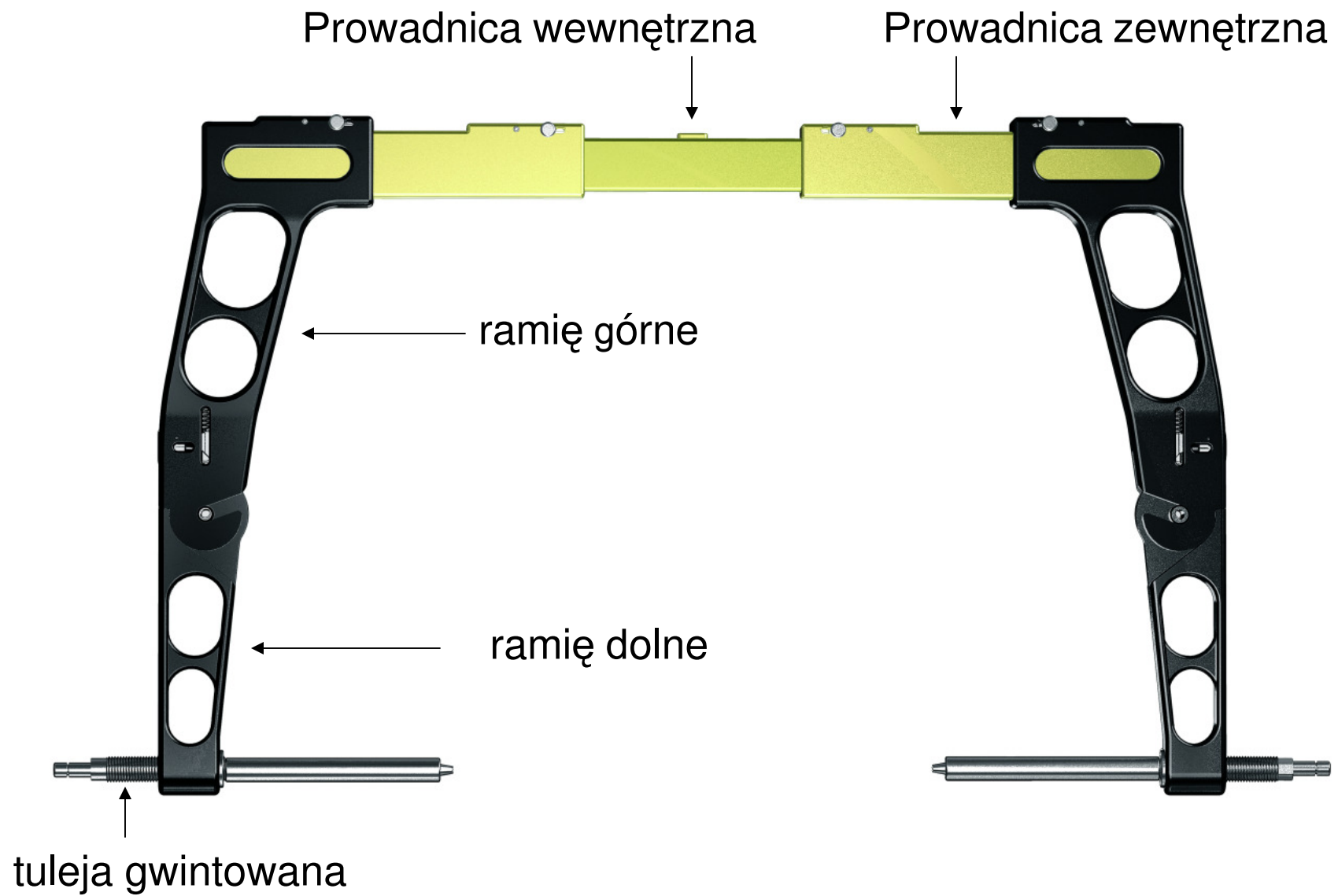

Szczegóły Klamry C

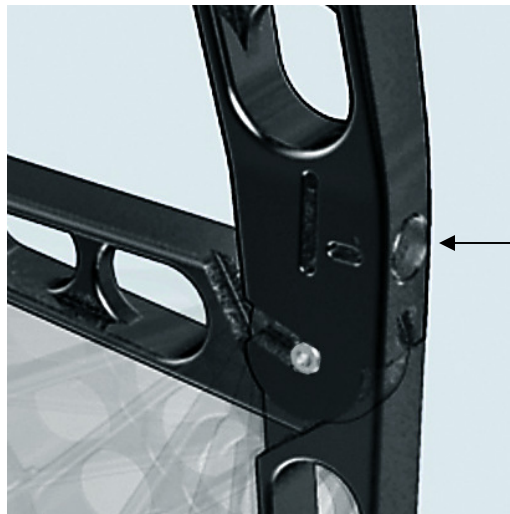


Przycisk umożliwiający uproszczone otwarcie dolnych ramion

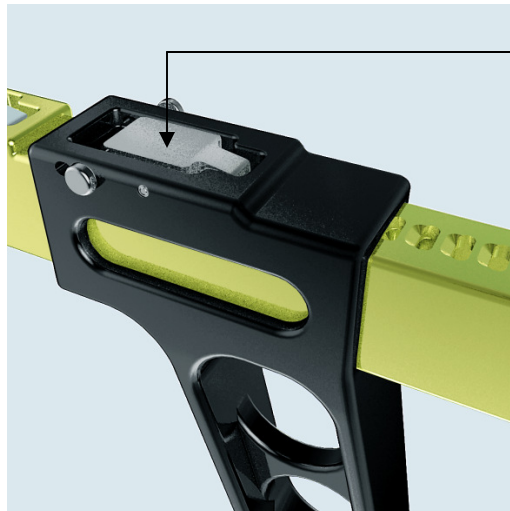


Przycisk umożliwiający rozszerzenie Klamry C


Technika operacyjna

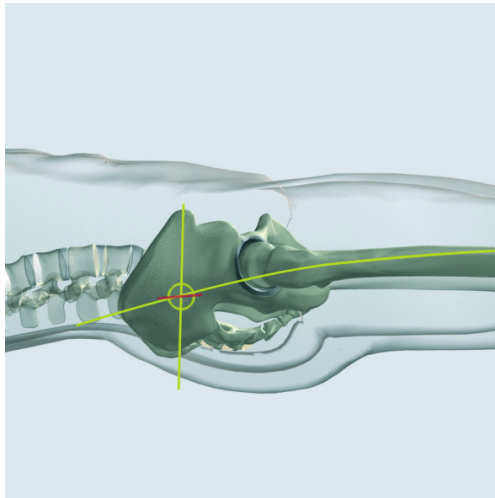


1. Etap
Zaznacz punkt
wprowadzenia

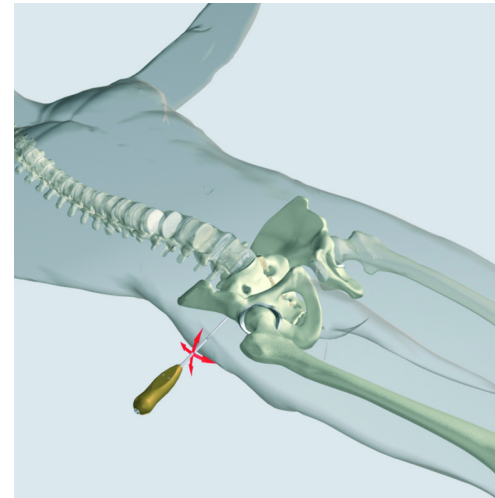

2. Etap
Za pomocą rączki
wprowadzającej określ
punkt wprowadzenia

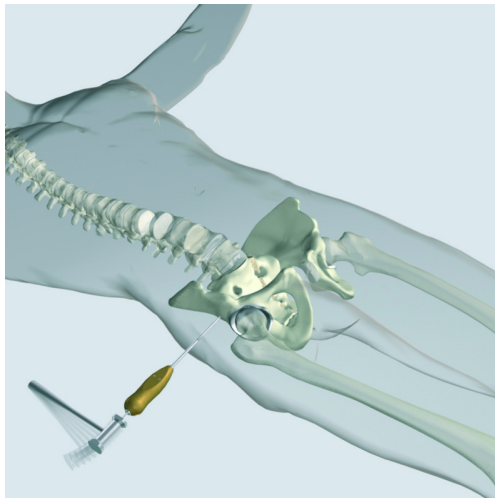


3. Etap
Przy pomocy
rączki
wprowadzającej
zainstaluj drut
Kirschnera po
stronie
nieuszkodzonej

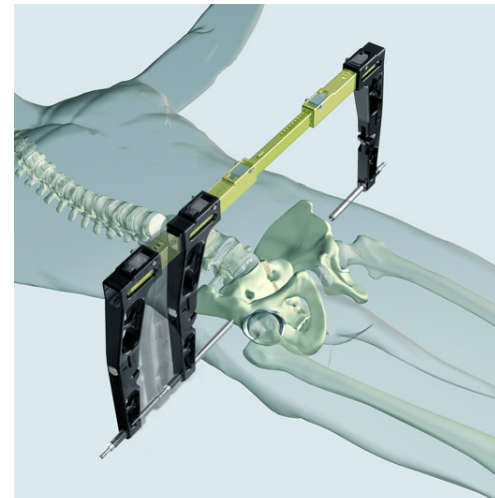


4. Etap
Wprowadź klamrę C


Technika operacyjna

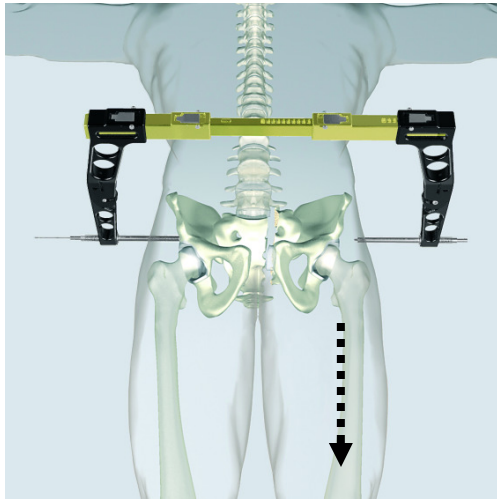


5. Etap
Nastaw złamanie

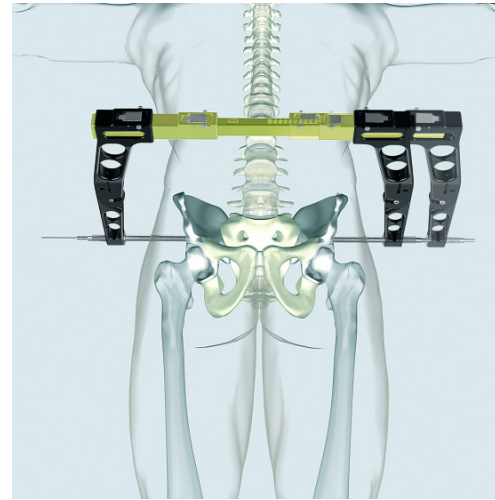

6. Etap
Skompresuj
klamrę C

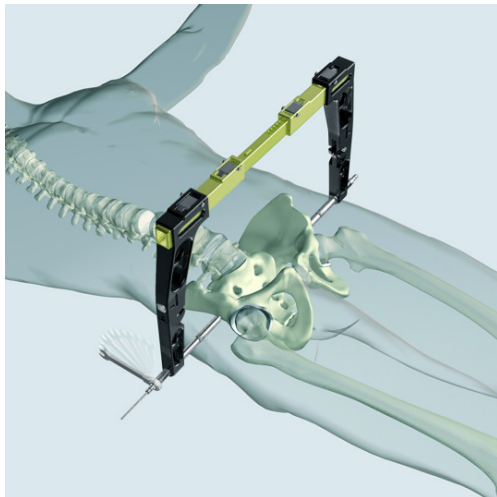

7. Etap
Przy pomocy
klucza dokręć
śruby

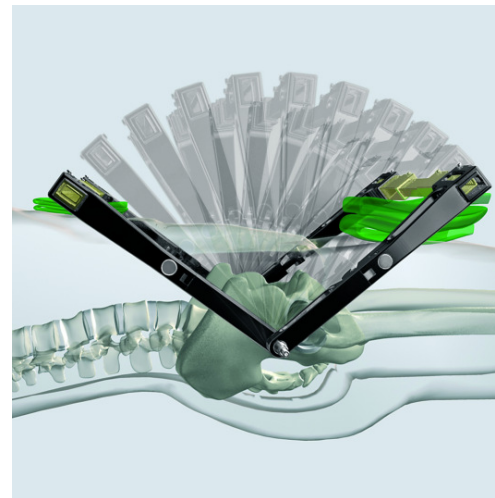

8. Etap
Klamra C może
być przesuwana
w kierunku
górnym i dolnym
części ciała
